

Hoe lenzen inzetten en uitnemen?



Inzetten:

1. Was steeds je handen en droog ze af met een schone handdoek



2. Zet de contactlens op je vingertop (rechts als je rechtshandig bent, links voor linkshandigen)

3. Ga na of de lens niet binnenstebuiten zit of niet beschadigd is

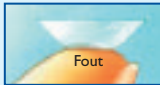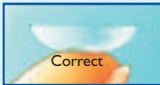

4. Hou je oogleden goed open en zet de lens in



5. Laat de oogleden pas los als de lens goed op het oog zit
6. Herhaal deze stappen met de andere lens

Uitnemen:

1. Was steeds je handen en droog ze af met een schone handdoek
2. Hou de oogleden goed open
3. Plaats je wijsvinger op de lens, kijk licht opwaarts en schuif de lens naar beneden.



4. Pluk de lens tussen duim en wijsvinger van het oog
5. Herhaal deze stappen met de andere lens

Het assortiment Focus® DAILIES®

Voor de correctie van bij- of verziendheid



Voor lensdragers met een cilinder



Ter afwisseling van een leesbril



Voordelen

Mijn sterke argumenten voor contactlenzen:

- met mijn contactlenzen heb ik een breder gezichtsveld dan met mijn bril
- ik kan vrij aan sport en andere activiteiten doen
- contactlenzen veranderen niets aan mijn natuurlijke uitstraling
- ik heb geen last van regendruppels op mijn brilglazen
- mijn lenzen beslaan niet en glijden niet van mijn neus
- de vervelende druk achter mijn oren is verdwenen
- ook mijn astigmatisme kan nu gecorrigeerd worden

Vraag advies aan je contactlensspecialist

CIBA Vision - A Novartis Company
Wayenborgstraat 22 - B-2800 Mechelen
Postbus 3126 - NL -4800 DC Breda
www.cibavision.be www.cibavision.nl



©2005 CIBA VISION CORPORATION - P10409

Overwin je angst voor contactlenzen

Focus® DAILIES®
D A G L E N Z E N

Comfort vanaf het eerste contact





... met Focus® DAILIES® is het zo makkelijk om lenzen te dragen.

Focus DAILIES daglenzen zijn zo makkelijk en aangenaam om te dragen dat je je mening over contactlenzen zal herzien.

Focus DAILIES daglenzen zijn ontwikkeld om haar dragers onmiddellijk, vanaf het eerste draagmoment een gevoel van comfort te geven. Bovendien kan je ze heel eenvoudig inzetten en ook weer makkelijk uitnemen. Zonder ongemak, zonder gedoe.

Buitengewoon comfort.

De unieke vorm, het zachte materiaal, een hydrogel met 69% water, en de zeer dunne randen, maken Focus DAILIES daglenzen zeer comfortabel. Vanaf het eerste contact, de hele dag lang.

Absolute zekerheid.

Omdat je telkens een nieuw paar lenzen gebruikt, heb je geen onderhoudsproduct nodig. Minder risico op allergie, minder afzetting, de makkelijkste manier om zorg te dragen voor je ogen.



Waar en wanneer je maar wil.

Focus DAILIES draag je zonder beperkingen, waar en wanneer je maar wil. Een avondje uit of een romantisch diner, een zakenreis of op vakantie, sporten of shoppen, er is altijd wel een Focus DAILIES moment.



Onovertroffen eenvoud.

Focus DAILIES zet je makkelijk in en neem je net zo makkelijk weer uit. Dankzij hun soepelheid nemen deze lenzen onmiddellijk de vorm van je oog aan.

Wie kan ervan genieten?

Bijna iedereen. Focus DAILIES bieden comfort en vrijheid aan:

- **bijzienden** (doosje van 30 en van 90 lenzen)
- **verzienden** (doosje van 30 en van 90 lenzen)
- **astigmaten** (doosje van 30 lenzen)
- **presbyopen** (doosje van 30 lenzen)

Focus® DAILIES®
D A G L E N Z E N

Comfort vanaf het eerste **contact!**